

AT02001, AT02002, AT02003

NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred vykonaním akýchkoľvek operácií skontrolujte stav zariadenia. Ak produkt funguje alebo vyzerá nezvyčajne, okamžite kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho lekára alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak spozorujete takéto poškodenie, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Viac informácií od výrobcu.

POPIS A ÚČEL POUŽITIA

Chodítka sú ľahké, ľahko použiteľné produkty, navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou pri pohybe. Poskytujú užívateľovi oporu, znižujú riziko prevrátenia a umožňujú aj chôdzu s obojstrannou oporou.

MODELÝ:

V závislosti od potrieb a preferencií užívateľa je možné zvoliť jednu z 3 verzií chodítok:

AT02001 – verzia so 4 otočnými kolieskami. Produkt umožňuje užívateľovi rýchly pohyb všetkými smermi a v prípade potreby je možné chodítko zablokovať zabrzdzením. Tento model odporúčame ľuďom s vysokou pohyblivosťou, ktorí nemajú problémy s rovnováhou.

AT02002 – verzia s 2 kolesami, chôdza. Umožňuje vám pohybovať chodítkom bez toho, aby ste ho museli zdvíhať.

AT02003 – verzia so 4 nohami, nastaviteľná, chôdza. Poskytuje najväčšiu stabilitu. Pre pohyb s chodítkom je potrebné ho úplne zdvihnúť (keď je zamknuté) alebo jeho bočnú stranu - keď je chodítko v pohyblivej variante. Odporúča sa hlavne na presun na krátke vzdialenosti.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom

UPOZORNENIA:

- 1) Nepoužívajte AT02001 pre ľudí s problémami s rovnováhou. To môže viesť k pádu používateľa.
- 2) Nevykláňajte sa z chodítka. Môže to spôsobiť pád používateľa.
- 3) Nehojdajte chodítko. Môže to spôsobiť pád používateľa.
- 4) Ak je chodítko štvorkolesové (AT02001), ak sa práve nepoužíva, jeho brzdy by mali byť zapnuté.
- 5) Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 150 kg.
- 6) Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom. Produkt sa môže vznietiť.
- 7) Uistite sa, že oceľový kolík nožičky alebo príchytka kolieska prechádza po inštalácii otvorom na oboch stranách steny. V opačnom prípade nemusí byť výrobok stabilný a otvor sa môže zdeformovať. Tiež kolík, ktorý mení chodítko na pevné, by mal prechádzať cez otvor na oboch stranách steny.
- 8) Nepoužívajte 4-kolesové chodítko (AT02001) v režime chôdze. Malo by byť vždy v stálej verzii.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

POZNÁMKA: Ak sa výrobok používa nesprávne, hrozí riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.



UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE:

Chodítko je na prepravu dodávané zložené.

Zložené
chodítko

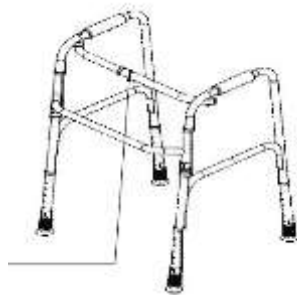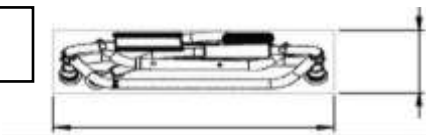

Západkové
tlačidlo

ROZKLADANIE

Chodítko sa rozkladá uchopením jeho bočných strán a ich vyklopením smerom von. Po rozložení chodítka by malo byť západkové tlačidlo v hornej strednej časti chodítka v otvore a zaistiť chodítko v rozloženej polohe.

SKLADANIE

Ak chcete chodítko zložiť, stlačte tlačidlo západky a potiahnite bočné strany chodítka dovnútra a potom chodítko zložte.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

Pred použitím výrobku upravte jeho výšku. Ak to chcete urobiť, odstráňte klip, upravte výšku - rovnaká pre všetky štyri nohy a potom vložte sponu do príslušného otvoru. UISTITE SA, ŽE OCEĽOVÝ KOLÍK PRECHÁDZA CEZ OTVOR NA OBOCH STRANÁCH. V opačnom prípade nemusí byť výrobok stabilný a otvor sa môže zdeformovať.



POUŽITIE

AT02002 a AT02003 sa môže používať v pevnom alebo kráčajúcom variante. Kráčajúca možnosť znamená, že strany chodítka sa posúvajú striedavo, čo umožňuje posunúť chodítko dopredu zdvihnutím len jednej strany. Pri pevnej možnosti je chodítko pevné. Pohybovať sa dá zdvihnutím celého chodítka a jeho posunutím dopredu.

Ak chcete zmeniť chodítko z chodiacej možnosti na pevnú, odstráňte príchytky na bokoch chodítka a nainštalujte ich do príslušných otvorov v prednej časti. Chodítko v modeloch AT02002 a AT02003 v pevnej variante nie je možné zložiť. Ak ju chcete zložiť, musíte ju prepnúť na rolovaciu možnosť.


POHYBOVANIE SA S CHODÍTKOM

AT02001 – Chodítko sa pohybuje v ľubovoľnom smere tlačení. AK MOMENTÁLNE POUŽÍVATEĽ VÝROBK NEPOUŽÍVA, AKTIVUJTE (STLAČENÍM) BRZD NA KOLIESÁCH.

AT02002 – Chodítko sa pohybuje vpred zdvihnutím zadnej časti chodítka, potlačením vpred a položením zadnej časti na zem.

AT02003 - Chodítko sa pohybuje tak, že ho nadvihnete a položíte mierne dopredu a pri krokovej verzii zdvihnutím jednej strany chodítka a posunutím dopredu, potom zopakovaním s druhou stranou.

MOŽNOSTI ZMENY: PEVNÉ-KROKOVACIE

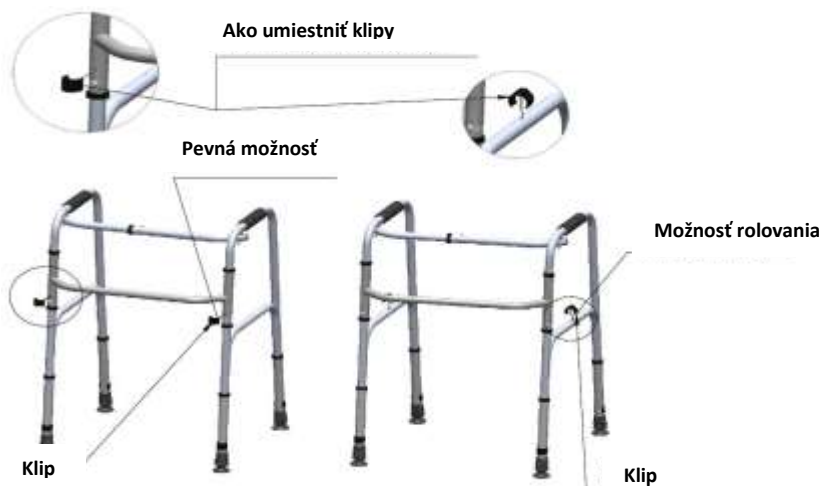

ŠPECIFIKÁCIA AT02001

Výška: 87-99 cm

Šírka (v najširšom bode - vonkajší rozmer): 56 cm

Šírka v zloženom stave: 15 cm

Šírka medzi držadlami: 41 cm

Hmotnosť: 4,2 kg

Priemer kolies: 75 mm

Maximálna hmotnosť používateľa: 2,5 kg: 150 kg

ŠPECIFIKÁCIA AT02002

Výška: 80-92 cm

Šírka (v najširšom bode - vonkajší rozmer): 56 cm

Šírka v zloženom stave: 15 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Hmotnosť: 3 kg

Priemer kolies: 75 mm

Maximálna hmotnosť používateľa: 2,5 kg: 150 kg

ŠPECIFIKÁCIA AT02003

Výška: 79 - 93 cm

Šírka (v najširšom bode - vonkajší rozmer): 56 cm

Šírka v zloženom stave: 15 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Hmotnosť: 2,75 kg

Maximálna hmotnosť používateľa: 150 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa

OBSAH BALENIA: Chodítko, návod na použitie

ÚDRŽBA A ČISTENIE VÝROBKU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a čistiacimi prostriedkami. Výrobok sa môže ošetrovať dezinfekčnými prostriedkami. Na čistenie sa nesmú používať drsné predmety a rozpúšťadlá.

SKLADOVANIE

Keď sa výrobok nepoužíva, mal by byť skladovaný na suchom a chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania výrobku môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023