

AT02004, AT02005, AT02006, AT02007

NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred vykonaním akýchkoľvek činností skontrolujte stav zariadenia. Ak produkt funguje alebo vyzerá nezvyčajne, okamžite kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho lekára alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak spozorujete takéto poškodenie, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií od výrobcu.

POPIS A ÚČEL POUŽITIA

Chodítka sú ľahké, ľahko použiteľné produkty, navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou pri pohybe. Poskytujú užívateľovi oporu, znižujú riziko prevrátenia a umožňujú aj chôdzu s obojstrannou oporou.

MODELÝ:

V závislosti od potrieb a preferencií používateľa je možné vybrať si zo 4 verzií chodítok:

AT02004 - verzia so 4 nohami, nastaviteľná. Poskytuje najväčšiu stabilitu. Na premiestnenie chodítka je potrebné ho zdvihnúť. Odporúča sa najmä na chôdzu na krátke vzdialenosti.

AT02005 - verzia s 2 kolieskami. Umožňuje premiestňovanie chodítka bez nutnosti jeho zdvíhania.

AT02006 - verzia so 4 kolieskami. Otočné zadné kolesá s brzdami. Výrobok umožňuje používateľovi rýchly pohyb vpred a v prípade potreby je možné chodítko zablokovat pomocou brzd. Model sa odporúča pre osoby bez problémov s rovnováhou.

AT02007 - verzia so 4 otočnými kolesami. Výrobok umožňuje používateľovi rýchly pohyb všetkými smermi a v prípade potreby je možné zablokovat chodítko aktivovaním brzd. Tento model sa odporúča pre osoby s vysokou pohyblivosťou a bez problémov s rovnováhou.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom

UPOZORNENIA:

- 1) Nepoužívajte AT02001 pre ľudí s problémami s rovnováhou. Môže to viesť k pádu používateľa.
- 2) Nevykláňajte sa z chodítka. Môže to spôsobiť pád používateľa.
- 3) Nehodajte chodítko. Môže to spôsobiť pád používateľa.
- 4) Ak je chodítko štvorkolesové (AT02001), ak sa práve nepoužíva, jeho brzdy by mali byť zapnuté.
- 5) Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 150 kg.
- 6) Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom. Produkt sa môže vznietiť.
- 7) Uistite sa, že oceľový kolík nožičky alebo príchytka kolieska prechádza po inštalácii otvorom na oboch stranách steny. V opačnom prípade nemusí byť výrobok stabilný a otvor sa môže zdeformovať. Tiež kolík, ktorý mení chodítko z krokavacieho na pevné, by mal prechádzať cez otvor na oboch stranách steny.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

POZNÁMKA: Ak sa výrobok používa nesprávne, hrozí riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiesťovanie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,


je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE:

Chodítko je dodávané zložené.

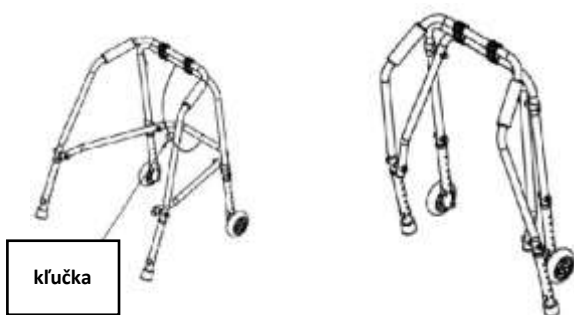

ROZKLADANIE

Chodítko sa rozkladá uchopením prednej časti rámu v blízkosti oboch bodov uchytenia šnúry a odťahnutím oboch častí od seba tak ďaleko, ako to len pôjde.

SKLADANIE

Ak chcete chodítko zložiť, potiahnite kľučku (gombík) dovnútra.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

Pred použitím výrobku upravte jeho výšku. Ak to chcete urobiť, odstráňte klip, upravte výšku - rovnakú pre všetky štyri nohy a potom vložte sponu do príslušného otvoru. UISTITE SA, ŽE OCEĽOVÝ KOLÍK PRECHÁDZA CEZ OTVOR NA OBOCH STRANÁCH. V opačnom prípade nemusí byť výrobok stabilný a otvor sa môže zdeformovať.



POHYB S CHODÍTKOM

AT02004 - Chodítko premiestnite tak, že ho zdvihnete a mierne posuniete dopredu.

AT02005 - Chodítko sa premiestni dopredu tak, že sa zdvihne jeho zadná časť, zatlačí sa a zadná časť sa položí na zem.

AT02006 - Chodítko sa posunie na ktorúkoľvek stranu jeho zatlačením. AK POUŽÍVATEĽ VÝROBKU PRÁVE NEPOUŽÍVA, MUSIA SA POUŽIŤ BRZDY NA KOLESÁCH (STLAČENÍM).

AT02007 - Chodítko sa dá posunúť zatlačením v ľubovoľnom smere. AK POUŽÍVATEĽ VÝROBKU PRÁVE NEPOUŽÍVA, MUSIA SA POUŽIŤ BRZDY NA KOLIESKACH (STLAČENÍM).

ŠPECIFIKÁCIA AT02004

Šírka (vpred): 47 cm.

Šírka v najširšej časti: 58 cm

Šírka v zloženom stave: 25 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Výška: 80-93 cm

Dĺžka: 60 cm

Hmotnosť: 1,4 kg

Maximálna hmotnosť používateľa: 150 kg

ŠPECIFIKÁCIA AT02005

Šírka (vpred): 47 cm

Šírka v najširšej časti: 58 cm

Šírka v zloženom stave: 25 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Výška: 80-93 cm

Dĺžka: 60 cm

Hmotnosť: 1,6 kg

Maximálna hmotnosť používateľa: 150 kg

ŠPECIFIKÁCIA AT02006

Šírka (vpred): 50 cm

Šírka v najširšej časti: 58 cm

Šírka v zloženom stave: 25 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Výška: 80-93 cm

Dĺžka: 60 cm

Hmotnosť: 2,3 kg

Maximálna hmotnosť používateľa: 150 kg

ŠPECIFIKÁCIA AT02007

Šírka (vpred): 50 cm

Šírka v najširšej časti: 58 cm

Šírka v zloženom stave: 25 cm

Šírka medzi rukoväťami: 41 cm

Výška: 80-93 cm

Dĺžka: 60 cm

Hmotnosť: 2,75 kg

Maximálna hmotnosť používateľa: 150 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

OBSAH BALENIA: Chodítko, návod na obsluhu

ÚDRŽBA A ČISTENIE VÝROBKU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a čistiacimi prostriedkami. Produkt môže byť podrobený pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Na čistenie nepoužívajte drsné predmety.

SKLADOVANIE

Keď sa výrobok nepoužíva, mal by byť skladovaný na suchom a chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania môže byť výrobok zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023
v1-19.06.2023