

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:
ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 3. Augusta 2022
v1- 03/08/2022



AT04601 , AT04602, AT04603, AT04604, AT04605

NÁVOD NA POUŽITIE BRUŠNÉ PÁSY



SK

AT04601 Brušný pás (biely)

Brušný pás sa používa na posilnenie brušných svalov a zabránenie posunu vnútorných orgánov v dôsledku brušných prietrží. Zapínanie na suchý zips poskytuje širokú možnosť regulácie. Odporúča sa pri brušnej hernii, oslabení brušných svalov, po pôrode a operáciách brušnej dutiny, po chirurgických zákrokoch.

Dostupné výšky pásu: 24 cm, 30 cm

Veľkosť (obvod pásu): S (80 ÷ 90 cm), M (91 ÷ 100 cm), L (101 ÷ 110 cm), XL (111 ÷ 120 cm), XS (<80 cm), XXL (121 ÷ 140 cm), XXXL (> 140 cm)

AT04602 Brušný pás (čierny, béžový)

Brušný pás sa používa na posilnenie brušných svalov a zabránenie posunu vnútorných orgánov v dôsledku brušných prietrží. Zapínanie na suchý zips poskytuje širokú možnosť regulácie. Odporúča sa pri brušnej hernii, oslabení brušných svalov, po pôrode a operáciách brucha, po chirurgických zákrokoch.

Výška pásu: 24 cm,

Veľkosť (obvod pásu): S (61,6 ÷ 81,3 cm), M (81,3 ÷ 94 cm), L (94 ÷ 104,1 cm), XL (104,1 ÷ 114,3 cm), XXL (114,3 ÷ 121,9 cm), XXXL 140 cm)

AT04603 Brušný pás - stomický

Brušný pás - stomický sa používa na udržanie, stabilizáciu a skrytie stomického vrečka, ako aj na podoprenie a spevnenie brušnej dutiny. Má zónu, kde si užívateľ môže sám vyrezať otvor na stomické vrečko - podľa individuálnych potrieb. Zapínanie na suchý zips poskytuje široké možnosti regulácie a pripojený prvok na suchý zips umožňuje skryť stomické vrečko. Pás je vyrobený z mäkkého priedušného materiálu, ktorý zaisťuje vysoký komfort používania. Odporúča sa pri stómii, brušnej hernii, oslabení brušných svalov, po operácii brušnej dutiny, po chirurgických zákrokoch.

Výška pásu: 24 cm

Veľkosť (obvod pásu): XS (70 ÷ 80 cm), S (81 ÷ 90 cm), M (91 ÷ 100 cm), L (101 ÷ 110 cm), XL (111 ÷ 120 cm), XXL (121 ÷ 130 cm), XXXL (> 130 cm)

Umiestnite pás tak, aby otvor stomického vrečka bol nad črevnou fistulou. Stomické vrečko pripevnené k pásu by malo byť chránené krycím prvkom. Poznámka: Súčasťou balenia nie sú stomické vrečky.

AT04604 Brušný pás s pelotou

Brušný pás sa používa na posilnenie brušných svalov a zabránenie posunu vnútorných orgánov v dôsledku brušných prietrží. Zapínanie na suchý zips poskytuje širokú možnosť regulácie. Priložená pelota poskytuje dodatočný tlak v mieste brušnej prietrže. Pás je vyrobený z mäkkého priedušného materiálu, ktorý zaisťuje vysoký komfort používania. Odporúča sa pri brušnej hernii, oslabení brušných svalov po operáciách brucha, po chirurgických zákrokoch.

Výška pásu: 24 cm

Veľkosť (obvod pásu): S (61,6 ÷ 81,3 cm), M (81,3 ÷ 94 cm), L (94 ÷ 104,1 cm), XL (104,1 ÷ 114,3 cm), XXL (114,3 ÷ 121,9 cm)

AT04605 Brušný pás

Brušný pás sa používa na posilnenie brušných svalov a zabránenie posunu vnútorných orgánov v dôsledku brušných prietrží. Pás je vyrobený z unikátneho zloženia dvoch sieťovín, vonkajšej - pevnej, nesúcej zaťaženie a vnútornej - mäkkej a pohodlnej v kontakte s telom. Vďaka tomu je pás mimoriadne priedušný, poskytuje vynikajúce odvádzanie prebytočného tepla a potu a "dýchanie" tela pod pásom. Zapínanie na suchý zips poskytuje širokú možnosť regulácie. Odporúča sa pri brušnej hernii, oslabení brušných svalov, po pôrode a operáciách brucha, po chirurgických zákrokoch.

Výška pásu: 24 cm

Veľkosti: (obvod pásu): S (70 ÷ 90 cm), M (80 ÷ 95 cm), L (90 ÷ 105 cm), XL (95 ÷ 112 cm), XXL (105 ÷ 121 cm), XXXL (115 ÷ 140 cm)

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorým z nasledujúcich udalostí:

a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,

b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,

c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:


V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

Návod na použitie:

Aby ste si vybrali správnu veľkosť, zmerajte si obvod pásu.

Uvoľnite suchý zips. Pás sa umiestni na bedrovo-krížovú chrbticu a potom sa vpredu zapne na suchý zips.

Produkt má široký rozsah regulácie, umožňuje rýchle a ľahké prispôbenie tvaru tela pacienta. Zapínanie na suchý zips zabezpečuje efektívnu imobilizáciu.

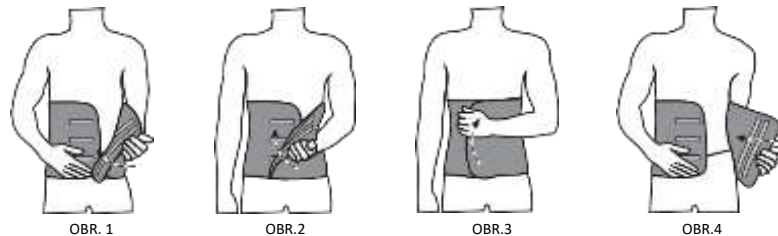

Upozornenia a odporúčania:

- Pred umiestnením produktu si pozorne prečítajte tento návod.

Pred každým použitím sa uistite, že výrobok nemá žiadne vady na švoch a jednotlivých prvkoch.

- Používanie výrobku v rozpore s pravidlami obsiahnutými v návode môže mať za následok vážne komplikácie.

Prípravok by sa mal používať podľa odporúčania lekára alebo fyzioterapeuta.

Prípravok by sa nemal používať v prípade otvorených rán, epidermálnych odrenín, ako aj po predchádzajúcom nanosení zahrievacieho gélu alebo masti.

Nosenie výrobku v noci je povolené len na odporúčanie ošetrojúceho lekára.

- V mieste, kde produkt prilieha k pokožke, je potrebné skontrolovať, či nedošlo ku kožným zmenám - kontaktujte svojho lekára.

-Pokiaľ lekár neurčí inak, pás noste maximálne 4 hodiny denne.

POZNÁMKA: Je zakázané používať výrobok v rozpore s jeho určením!

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ortému je možné prať iba ručne vo vlažnej vode (do 40°C) s prídanim jemného pracieho prostriedku (napr. sivé mydlo).

Nežehlite. Nečistite na sucho. Nepoužívajte bieliadlo. Chráňte pred vlhkosťou. Nevystavujte vysokým teplotám. Nesušte v sušičke. Sušte rozložené, pred sušením jemne vyžmýkajte.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.