

ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na chodítko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo chodítko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu
- 5) **Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.**

Výrobca:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko



Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716

NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO

AT51042



INDIKÁCIE

Skladacie chodítko je určené pre ľudí s problémami s vertikalizáciou, s ochoreniami pohybového ústrojenstva alebo pre ľudí s problémami s udržaním rovnováhy pri chôdzi. Chodítko poskytuje užívateľovi oporu, čím sa znižuje riziko prevrátenia. Produkt dobre poslúži pri nácviku chôdze alebo po úrazoch.

CHARAKTERISTIKA

- vyrobené z vystuženého hliníka
- vybavené 4-palcovými otočnými prednými kolesami a 4-palcovými zadnými kolesami
- jednoduché skladanie a preprava, zložené pomocou jedného tlačidla
- 8 úrovní nastavenia výšky
- ergonomické PVC rukoväte

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. Zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

UPOZORNENIA:

1. Pred použitím chodítka si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Používanie chodítka na zemi, ktorá neposkytuje spoľahlivú oporu, t.j. vlhká, ľadová, masťná, silne piesčitá, je neprijateľné z dôvodu rizika pádu.
- 3 Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých konštrukčných prvkov výrobku a starostlivo skontrolujte stabilitu a stav nosného rámu
4. Chodítko slúži len na podopretie jedného užívateľa, je zakázané stáť na chodítku.
5. Neprekračujte maximálnu výškovú úroveň.
6. Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 110 kg.
7. Chodítko nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek viditeľné alebo hmatateľné poškodenie (napr. Prasknutie rámu), pretože to môže viesť k nehode.
8. Nenakláňajte sa z chodítka. Môže to spôsobiť pád používateľa.
9. Nehojdajte chodítko. Môže to spôsobiť pád používateľa.
10. Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.

UPOZORNENIE: Pri používaní a manipulácii s výrobkom, ako aj pri jeho montáži a nastavovaní mechanizmov môže vzniknúť nebezpečenstvo zachytenie a/alebo privretie častí tela užívateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto činnosti by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním alebo nesprávnou údržbou, servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výška: 85-102,5 cm, 8 úrovní nastavenia, každých 2,5 cm

Šírka medzi rúčkami: 42 cm

Šírka: 63 cm

Šírka v zloženom stave: 12 cm

Dĺžka: 48 cm

Rozmery balenia: 56x12x75 cm

Celé kolesá: 4"

Maximálna hmotnosť užívateľa: 110 kg

Hmotnosť: 3,75 kg

Hmotnosť s kartónom: 4,5 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

ROZKLADANIE

Ak chcete chodítko rozložiť, vytiahnite bočné strany chodítka von a potom namontujte nohy vo vhodnej výške.

SKLADANIE

Ak chcete chodítko zložiť, stlačte tlačidlo západky a potiahnite bočné strany chodítka dovnútra a potom chodítko zložte.

POHYBOVANIE SA POMOCOU CHODÍTKA

Postavte sa k chodítku, oboma rukami držte rúčky chodítka, uhol ohybu nôh by mal byť asi 30°. Na zastavenie chodítka, položte váhu svojho tela na rukoväť.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník indikuje používanie chodítka dospelým a deťom na vlastné riziko s prihladením na dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie s prihladením na informácie poskytnuté výrobcom.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Výrobok môže byť vystavený pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Uistite sa, že dezinfekčný prostriedok neobsahuje agresívne chemikálie, ako sú silné kyseliny a zásady. Nepoužívajte drsné čistiace predmety ani silné čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť skladovaný na suchom a chladnom mieste.