

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.

2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.

3)) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.

4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.

5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.

6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku masťnými substanciami alebo benzínom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie počas používania ako sú ložiská, gumové diely a iné.

7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.

8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.

9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J

I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski

Ul. Zawisłańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Tel. 22 518 36 00

Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.

Nádražná 329

015 01 Rajec

Tel .: 041/542 49 16; Fax: 041/542 49 16

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk

WWW: www.anmedplus.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

AT51122

STOLIČKA DO SPRCHY OTOČNÁ



Sprchová stolička s otočným sedadlom AT51122 slúži pre uľahčenie sanitárnych činností. Určená je pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorá ovplyvňuje ich nezávislý výkon každodenných činností. Stolička sa odporúča používať v sprche alebo vo vani, v domáciach alebo nemocničných podmienkach.

Stolička na nožičkách je výškovo nastaviteľná pre zaistenie maximálneho pohodlia užívateľa. Výrobok má protišmykové násadky.

Po použití stoličky je potrebné dôkladne ju vyčistiť. Je možné použiť štandardné čistiace a dezinfekčné prostriedky. Produkt je po vyhodení určený do komunálneho odpadu.

Popis

- Funkcia otočenia o 360° umožní otočiť užívateľa bez nutnosti vstávania
- Mäkké pohodlné sedadlo, rám z ľahkého hliníka (odolný proti korózii)
- Nohy stoličky ukončené protišmykovými gumovými násadkami so zväčšenou kontaktnou plochou so zemou zaručujú vysokú stabilitu
- Systém skladania stoličky je ľahký a pohodlný bez použitia náradia

Materiál	Hliník / umelý plast
Nastaviteľná výška	Áno
Nosnosť	115 kg
Výška sedadla od podlahy	35,3 – 53 cm
Priemer sedadla	29,6cm
Šírka	36,5 cm
Celková hmotnosť	1,65 kg

Montáž

1. Pre zjednodušenie montáže položte stoličku na rovný povrch.
2. Nohy stoličky vložte do určených otvorov na opačnej strane sedadla (musia zacvaknúť)
3. Umiestnite stabilizačnú vzperu na určené miesto do západky.
4. Teraz môžete nastaviť výšku stoličky. Uistite sa, že západky sú správne usadené v rovnakej výške.

Upozornenia

1. Počas používania, pri skladaní a nastavovaní mechanizmov hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia alebo zovretia čatí tela užívateľa alebo sprevádzajúcej osoby v otvoroch (medzerách) medzi jednotlivými prvkami.
2. Pred každým použitím produktu vždy skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné časti dobre zaфикované.
3. Na mokrom alebo klzkom povrchu buďte opatrní.
4. Nestrkajte prsty do otvorov na sedadle (slúžiace na odtok vody). Môže dôjsť k zovretiu alebo uviaznutiu prstov.
5. Nepoužívajte poškodený alebo pokazený výrobok.
6. Produkt uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Chýbajúce, poškodené alebo opotrebované diely môže vymeniť iba autorizovaný servis.
8. Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové alebo agresívne čistiace prostriedky.
9. Pri používaní produktu buďte obzvlášť opatrní.
10. Skontrolujte, či je výrobok správne zložený.
11. Nenakláňajte sa príliš dozadu, hrozí nebezpečenstvo prevrátenia.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

INFORMÁCIE



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.