

**NÁVOD NA POUŽITIE**  
**AT51424**  
**REHABILITAČNÁ KUPOLA**

**Úvod**

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím je potrebné dôkladne sa oboznámiť s návodom na použitie. Nesprávne použitie môže viesť k ujme na zdraví, ublíženiu alebo nehodám. Pre bezpečné a úspešné používanie si preto prečítajte pozorne tento návod.

**Upozornenie:**

Skontrolujte produkt, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade akéhokoľvek poškodenia, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií u výrobcu.

**Upozornenie:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

**Upozornenie:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

**Upozornenie:**

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou, nedostatočnou údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov obsiahnutých v tomto návode na použitie.

**Upozornenie:**

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

**Upozornenie:**

Horľavý výrobok.

Výrobok nesmú používať deti mladšie ako 3 roky.

**Použitie:**

Výrobok je určený pre ľudí, ktorí potrebujú rehabilitáciu v dôsledku sedavého spôsobu života.

**Kontraindikácie:**

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré znemožňujú bezpečné zaobchádzanie s výrobkom.

**Vlastnosti:**

- sada 2 balančných pologulí naplnených vzduchom
- ostnatý povrch je ideálny pre senzorickú stimuláciu
- vhodné pre všetky vekové kategórie, prispôsobené úrovni zručností používateľa
- bez latexu a ftalátov, vhodné pre osoby citlivé alebo alergické na tieto materiály

**Aplikácia:**

- prevencia zranení (napr. vyvrtnutie členku)
- ploché nohy
- päťová ostroha
- zlepšuje stabilitu členku, koordináciu
- zvyšuje pevnosť ramenného pletenca

**Skladovanie**

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

**Údržba**

Kupolu je potrebné čistiť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ostré predmety ani rozpúšťadlá.

**Likvidácia**

Komunálny odpad by sa mal likvidovať v súlade s platnými podmienkami likvidácie.

**Technické parametre AT51413**

Priemer kupoly – 16 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa – 180 kg



**Táto značka znázorňuje maximálnu hmotnosť užívateľa.**

**Zloženie:** PVC

**Obsah balenia:**

2 kupoly, návod

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....  
Sériové číslo:

.....  
Dátum predaja:

.....  
Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.
- 3) ) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je potrebné bezodkladne ho odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.
- 8) **TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.**
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

### Výrobca:

ANTAR Sp. J  
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski  
Ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko  
Tel. 22 518 36 00  
Fax 22 518 36 30  
www.antar.net

### Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.  
Nádražná 329  
015 01 Rajec  
Tel. : 041/542 49 16; Fax:  
041/542 49 16  
E-mail:  
anmedplus@anmedplus.sk

