




NÁVOD NA POUŽITIE

Lôžko elektrické AT52201

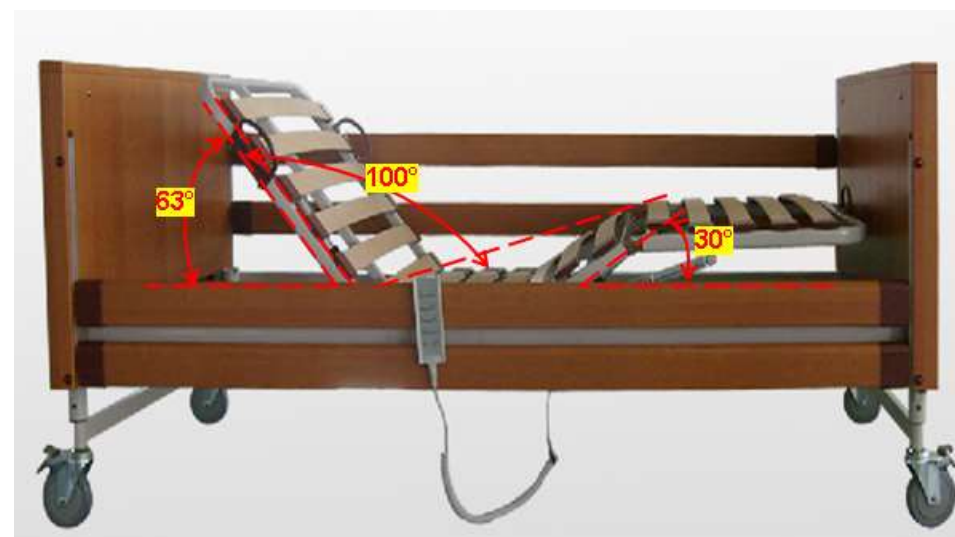

Pred použitím sa zoznámte so zásadami bezpečného používania a údržbou.



Úvod

Polohovacie lôžka sú vyrobené pomocou najmodernejších technológií, aby bolo zabezpečené čo najväčšie pohodlie pacienta. Pri výrobe bol kladený dôraz na jednoduchú obsluhu a ľahkú manipuláciu.

Charakteristika

A. Elektrické ovládanie s piatimi funkciami pre nastavenie: chrbtovej opierky, opierky nôh, výšky lôžka, funkcia "Trendelenburg" následne "Opačný Trendelenburg"

B. Rám lôžka: kolieska s individuálnym blokovacím systémom. Drevená doska s prednou aj zadnou časťou lôžka, drevené bočné časti lôžka

C. Ručné ovládanie

Popis

Elektrické polohovacie lôžko je určené pre jednu osobu do hmotnosti 175 kg. Polohovacie lôžko je vybavené kolieskami o priemere 125 mm pre jednoduchú manipuláciu. Umožňuje presúvanie lôžka po rovnom podklade všetkými smermi.

Záručný list

Model:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

Výrobné číslo:

- 1) Firma **Anmed Plus s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec**, dáva od dátumu predaja záruku dva roky na elektrické polohovateľné lôžko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo elektrické polohovateľné lôžko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak firma Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) V prípade že zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. (bod 1), alebo sa obráťte na predajcu.
- 5) Pred uvedením do prevádzky sa oboznámte s priloženou používateľskou príručkou pre obsluhu. Pokiaľ nedôjde k užívaniu výrobku v súlade s užívateľskou príručkou táto reklamácia nebude uznaná.
- 6) Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, ako sú kolieska. Záruka sa nevzťahuje na prepichnutie alebo prerezanie mäkkých častí. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie pôsobením statickej záťaže nad 220 kg alebo dynamickej záťaže cez 175 kg, nadviazaním kontaktu s masnými látkami a benzínom.
- 7) Táto záruka je platná len s dokladom o kúpe tovaru (účtenka, faktúra).
- 8) Reklamácia bez priloženia potvrdenia o kúpe nebude uznaná.

Plán testovania

Pozor!

- Nesprávne fungujúce lôžka ihneď vyradíte z prevádzky a zaistíte proti neoprávnenému použitiu - vytiahnete zo zásuvky.
- Akékoľvek nedostatky ihneď nahlásite zodpovednej osobe.

Pozor!

- Je dôležité ihneď odstrániť všetky nedostatky, ktoré môžu viesť k ovplyvneniu funkčnosti lôžka.

Likvidácia

Keď lôžko už neplní svoj účel, alebo jeho prevádzka už nie je ekonomická, treba ho zlikvidovať v súlade s medzinárodnými ekologickými predpismi. Každá časť lôžka musí byť zlikvidovaná daným spôsobom.

- Produkt ani jeho komponenty nesmú prísť do odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Výrobok ani jeho časti nepatria do bežného domáceho odpadu. Elektrické a iné mechanické časti musia byť recyklované, alebo odvezené do zberne. Batérie musia byť odovzdané na špeciálnych miestach.

Výhradný dovozca:

ANMED PLUS s.r.o.

Nádražná 329

015 01 Rajec

Tel .: 0 415 424 916; Fax: 0 415 424 916

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk;

WWW: www.anmedplus.sk

Výrobca:

ANTAR Sp. J

I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski

Ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko


Tel. 22 518 36 00

Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Popis častí


1. Pojazdové kolieska polohovacieho roštu lôžka
2. Čelná doska s rámom pre uchytienie koliesok, bočníc lôžka a zdvíhacích komponentov
3. Zadná doska s rámom pre uchytienie koliesok, bočníc lôžka a zdvíhacích komponentov
4. Kolieska o priemere 125 mm
5. Bočný rám lôžka
6. Zdvíhacie komponenty v časti roštu
7. Polohovací rošt
8. Spojovacie skrutky
9. Ovládací panel
10. Riadiaca jednotka JIECANG

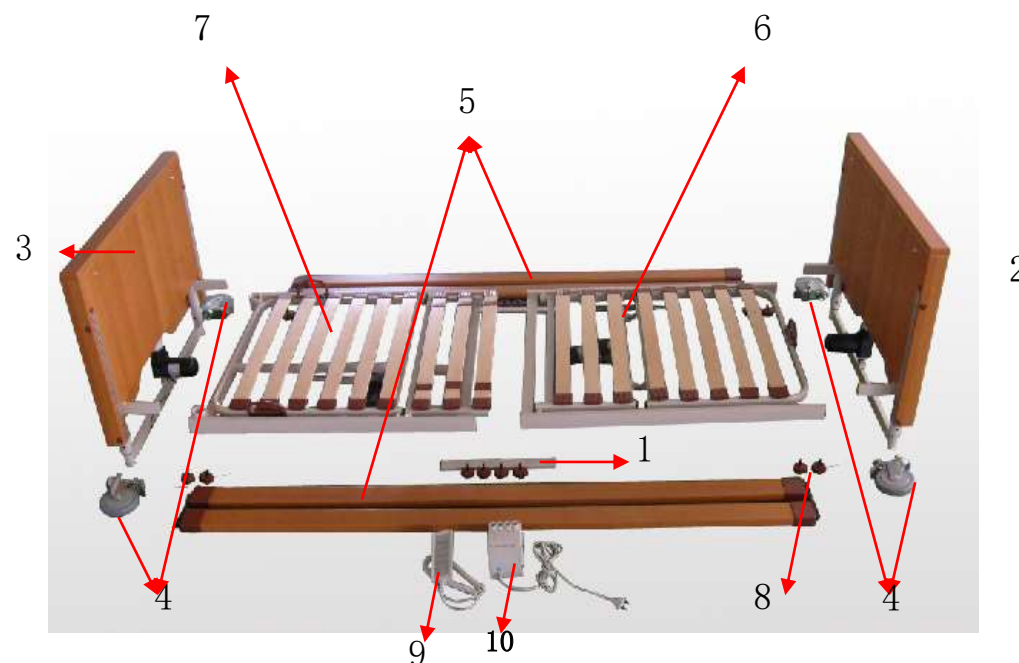


Obsluha ovládacieho panela

Základné funkcie tlačidiel pre zdvíhanie a spúšťanie:


Regulácia časti opierky chrbta – tlačidlo slúži na zmenu uhla polohy chrbtovej časti

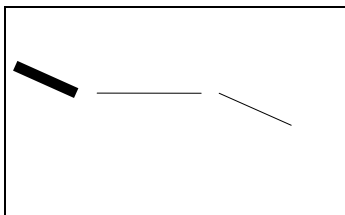



Regulácia časti opierky nôh – tlačidlo slúži na zmenu uhla polohy nožnej časti

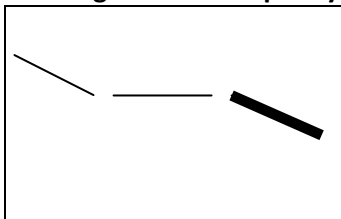

Regulácia časti výšky lôžka – tlačidlo slúži na nastavenie výšky lôžka

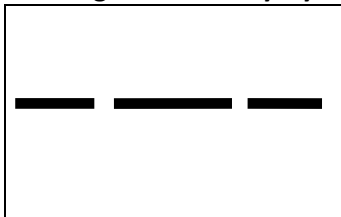

Nastavenie pozície strán lôžka – tlačidlo slúži na zníženie alebo zvýšenie prednej alebo zadnej strany lôžka

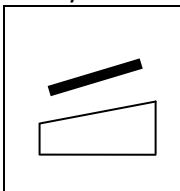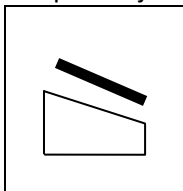

Nebezpečenstvo zachytenia!

U všetkých ohybov a v miestach, kde je upevnený matrac. Pri nastavovaní polohy a výšky lôžka dbajte na:

- pred nastavovaním výšky lôžka sa uistite, že pohybu nič nebráni (nábytok, veci pod posteľou a pod.)
- nepoužívajte motory nepretržite po dobu dlhšiu ako 2min. Po tejto dobe je potrebné nechať motory aspoň 18 minút odpočinúť. Nikdy nepoužívajte viac ako dva motory súčasne.
- pri opúšťaní lôžka, pri líhaní na lôžko a ak nie je v blízkosti dozerajúca osoba, lôžko vždy nastavte do najnižšej polohy
- pri nastavovaní lôžka pozorujte pacienta a berte do úvahy polohu okolitého nábytku

Nastavenie výšky bočníc

Vytiahnutie bočníc:

→ Vytiahnite bočnice až zaklapne zarážka

Zníženie bočníc:

→ Bočnice mierne nadvihnute

→ Stlačte zaistovacie gombík a posuňte bočnice nadol

POZOR! Nenechávajte bočnice voľne padnúť na dolné zabezpečenie!

Vždy posúvajte bočnice rukami. Vždy pohybujte bočnicami na oboch koncoch v rovnakom smere.

Bočnice neohýbajte.

Čistenie

Poznámka:

- Pri čistení lôžka nepoužívajte žiadne ostré nástroje (nože, kovové stierky alebo agresívne prostriedky)
- Nepoužívajte tlakové prístroje
- Na čistenie používajte vlhkú handru
- Používajte iba jemné čistiace prostriedky, vyhnite sa drhnutiu a hrubému tlaku na akékoľvek súčasti lôžka

Kontrola a údržba

Akákoľvek kontrola musí byť vykonaná kompetentným technikom, ktorý je schopný rozoznať prípadné závady alebo riziká. Pred vykonávaním údržby si vždy dôkladne prečítajte príslušné kapitoly manuálu. Akékoľvek škody spôsobené nepreštudovaním tohto manuálu nebudú zahrnuté do záručných opráv.

Po vykonaní akýchkoľvek úprav vždy vykonajte test funkčnosti!

- ak vykonávate opravu polohovacích motorov, vždy sa uistite, že nemôže dôjsť k pretrhnutiu alebo rozdrveniu kabeláže

Mechanické alebo elektrické zlyhanie!

- poškodené alebo zle fungujúce lôžka vyradte z prevádzky a zaistite ich proti neoprávnenému užívaniu
- používajte iba originálne náhradné diely
- vykonávajte údržbu vždy v predpísaných intervaloch
- nenahrádzajte žiadne z elektrických alebo mechanických doplnkov bez priameho povolenia od výrobcu
- pri údržbe a opravách používajte predpísané náradie
- nerozoberajte elektrické súčasti

Prevádzka polohovacieho lôžka

- nepoužívajte elektronické zdravotnícke zariadenia na pacientov na lôžku
- nepoužívajte polohovacie lôžka tam, kde sa vyskytujú silné elektromagnetické polia (RTG)

Všeobecné informácie

Pred kompletizáciou alebo užívaním polohovacieho lôžka si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce informácie

Technické parametre

Celkový rozmer lôžka (dxšxv) v mm: 2115 x 1025 x 405 - 810

Matrac: 90 x 195 cm

Nastavenie výšky: od 405 - 810 mm

Opierka chrbta: -63 °; opierka nôh - 30 °; opierka hlavy - 100 °

Hmotnosť: 105kg

Zaťaženie: 175 kg

Napätie: 230 V, 50 Hz

Výstupné napätie: DC 24V, Max. 100VA

Cyklus: S 2-10 min

Správne používanie

Polohovacie lôžka sú určené pre dlhodobé využitie namiesto obyčajných postelí.

Sú navrhnuté tak, aby čo najviac sprijemnili pacientovi aj obsluhujúcemu personálu používanie. Lôžka sú pre svoju komplexnosť schválené pre užívanie osobami staršími ako 12 rokov.

Lôžka sú určené pre:

- domáce ošetrovanie
- rehabilitačné inštitúcie, opatrovateľské domy a pod.

Uistite sa, že:

- všetky osoby poverené údržbou a kompletizáciou lôžka aj jeho užívatelia preštudovali tento manuál
- všetky zmienené osoby majú k manuálu voľný prístup - akékoľvek škody spôsobené v dôsledku nepreštudovania nasledujúceho manuálu nebudú hradené v rámci záruky

Prevádzkové obmedzenia!

Toto lôžko by nemali využívať pacienti vyšší ako 195 cm

Nebezpečenstvo úrazu!

- pred použitím sa vždy uistite, že kabeľ je v perfektnom stave a napäťová ochrana je funkčná
- používajte lôžko len na účely, na ktoré je určené
- lôžko nepreťažujte
- používajte len v prípade, že je lôžko v perfektnom stave
- pokiaľ lôžko nie je pod dozorom, vždy ho nastavte na najnižšiu možnú výšku
- chyby, ktoré môžu ovplyvňovať funkčnosť alebo bezpečnosť je nutné okamžite odstrániť
- vždy zabezpečujte lôžko pomocou brzd proti pohybu
- používajte vždy všetky brzdy
- používajte iba doplnky schválené firmou ANMED PLUS s.r.o.

Elektrické súčasti

Nebezpečenstvo skratu a požiaru!

- vždy sa uistite, že hlavný napájací kábel nemôže byť prejdený, či už pri manipulácii s lôžkom alebo okolitým nábytkom
- pred použitím sa uistite, že všetky káble sú v správnej pozícii. Prekrútenia, uzly alebo slučky sú na kábloch nežiaduce
- pokiaľ lôžko nie je dlhšiu dobu využívané, vždy odpojte hlavný napájací kábel

Upozornenie pre obsluhu - nebezpečenstvo úrazu!

- nepoužívajte elektronické zdravotnícke zariadenia na pacientov na polohovacom lôžku
- nepoužívajte polohovacie lôžka v bezprostrednej blízkosti objektov so silným elektromagnetickým poľom (väčšina zdravotníckych prístrojov)
- hlavný prívod elektriny vždy zapájajte do samostatnej zásuvky
- vedzte hlavný napájací kábel k zásuvke tak, aby nebol príliš napnutý a nedošlo k jeho vytrhnutiu, ani ho nenechávajte príliš voľný, aby nedochádzalo k jeho prehýbaniu, prípadne nemohlo dôjsť k jeho prejdeniu.

Nebezpečenstvo úrazu - priškripanie a pod.!

- lôžko vždy upravte pre daného pacienta s ohľadom na okolité vybavenie
- ak má pacient podváhu, uistite sa, že medzera medzi matracom a bočnicami lôžka nie je príliš veľká
- vždy sa uistite, že bočnice sú riadne zaistené - nebezpečenstvo spojené so zmenou polohy pacienta!
- vždy zablokujte na ručnom ovládači funkcie, ktoré by mohli ohroziť zdravie pacienta (konzultujte s lekárom)
- pred znepriístupnením niektorých nastavení polohy vždy berte do úvahy pacientov stav

Pád z lôžka

- pokiaľ lôžko nie je pod dozorom, pri jeho opustení a ulíhaní do neho, nastavte ho vždy do najnižšej polohy

Nebezpečenstvo spojené s prehriatím motora!

- pred nastavovaním výšky lôžka sa uistite, že nič nebráni jeho prenastaveniu do Vami požadovanej polohy (nábytok, objekty pod lôžkom)
- nepoužívajte ovládací motor bez prestávky po dobu dlhšiu ako 2min. Potom je potrebné nechať motor aspoň 18 minút v nečinnosti
- nikdy nepoužívajte viac ako dva polohovacie motory zároveň

Nebezpečenstvá spojené s nesprávnou montážou!

- uistite sa, že všetky súčasti polohovacieho lôžka boli správne zostavené
- uistite sa, že všetky nastavenia upravujúce polohu, sklon a pod. fungujú správne

Nebezpečenstvo úrazu!

- úpravy a kompletizáciu lôžok môže vykonávať iba poverená osoba a to iba ak má na to vhodné nástroje

Nebezpečenstvo zachytenia!

- existuje potenciálne nebezpečenstvo zachytenia alebo uviaznutia končatín u všetkých spojov lôžka a v oporných miestach pre matrac. Všetky takéto miesta sú označené symbolom

Po kompletizácii vždy otestujte všetky funkcie lôžka!