

ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na invalidný vozík. Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bol invalidný vozík funkčný, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.

Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.

Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu.

Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na obsluhu. Nedodrzaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.

NÁVOD

NA POUŽITIE INVALIDNÝCH VOZÍKOV KM-2501



Karma ERGOLITE KM-2501 je v súčasnej dobe jedným z najľahších vozíkov na trhu.

Doporučuje sa predovšetkým pre prevoz pacienta v prípadoch, keď sa musí vozík často skladať.

Mechanický vozík štandardný konštrukcia rámu, rám vozíka je hliníkový s nosnosťou 100 kg. Vozík je dodávaný v šírkach sedačky 41 alebo 46 cm. Poťah sedadla a chrbtovej opierky vozíka sú textilné a veľmi priadušné. Použitý textil má antibakteriálnu úpravu. Stupačky vozíka sú dvojdielne, dĺžkovo nastaviteľné, odklopiteľné. Celková hmotnosť vozíka je 7,8 kg.

Sedačka vozíka je "esovito" prehnutá a vďaka tomu je aj celodenné užívanie vozíka veľmi pohodlné. Chrbtovú opierku je možné pre potrebu transportu "zlomiť" - z obrázku nižšie je potom zrejme ako kompaktný je vozík zložený pre transport. Poťah sedadla a chrbtovej opierky vozíka je textilný, umývateľný a veľmi priadušný. Vozík je doplnený odnímateľným polstrovaním. Zadné kolesá vozíka majú plný plášť o rozmere 14 x 1 3/8 "s Predné kolesá sú plné o rozmere 6 x 1 3/8". Rám vozíka má metalický lak vo farebnej kombinácii antracit a strieborná.

NÁVOD NA POUŽITIE INVALIDNÝCH VOZÍKOV KM-2501

1. Všeobecné informácie

Invalidný vozík je určený pre osoby s dočasnou alebo trvalou indispozíciou k samostatnému pohybu. Vozík môžu používať osoby s váhou do 115 kg. Prehľad vlastností a dodatočného príslušenstva vozíka je uvedený v prehľade, ktorý je súčasťou tohto návodu.

Skôr ako začnete invalidný vozík používať, je nutné sa zoznámiť s týmto návodom, je to dôležité pre bezpečnosť užívateľa.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1) Nastupovanie a vystupovanie z vozíka je potrebné vykonávať pri nastavených brzdách a zabrzdennom vozíku.
- 2) Počas jazdy sa nesmú používať brzdy (len iba ak sa vozík nepohybuje)! Netýka sa to ručnej brzdy používanej osobou, ktorá vozík tlačí (pri type, ktorý to umožňuje).
- 3) Pri naklonení dopredu, je potrebné dávať pozor, aby sa váha nepremiestnila príliš dopredu. Aby ste zvýšili stabilitu vozíka, pred nakláňaním dopredu je potrebné sa uistiť, že predné kolesá sú nasmerované dopredu v smere jazdy!
- 4) Nenakláňajte sa príliš dopredu a tiež nevykláňajte sa na bok vozíka!
POZOR: NADMERNÉ NAKLÁŇANIE DOPREU ALEBO NA BOK MÔŽE VIESŤ K VYPADNUTIU Z VOZÍKA A PORANENIA!
- 5) Pri nastupovaní a vystupovaní z vozíka nestojte na podnožkách, môže to viesť k prevráteniu vozíka.
- 6) Pri vychádzaní na prahy sa alebo iné prekážky, pri prenášaní celej váhy na zadné kolesá, buďte opatrní. Ak máte obavy, či sa Vám to podarí, obráťte sa bezpodmienečne o pomoc na druhú osobu.
POZOR: NEOBRATNÉ ALEBO NEOPATRNE PRENÁŠANIE VÁHY NA ZADNÉ KOLESÁ

MÔŽE VIESŤ K PREVRÁTENIU VOZÍKA DOZADU, ČO JE VEĽMI NEBEZPEČNÉ A MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU PORANENIU! V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK POCHYBNOSTÍ, ČI JE BEZPEČNÉ PREKÁŽKU PREKONAŤ, OBRÁŤTE SA BEZPODMIENEČNE O POMOC NA DRUHÚ OSOBU!

Vyvarujte sa kontaktu vozíka s otvoreným ohňom. Pri priamom kontakte textilných, plastových a gumových častí s ohňom, môže dôjsť k ich vznieteniu

3. Obsluha a údržba

opierku je možné pre potrebu transportu "zlomiť."

- Vozík má skladací rám - vozík skladáme povytiahnutím prostrednej časti sedačky smerom nahor (najsôr je nutné odopnúť vankúš, ktorý je pripevnený k sedačke suchým zipsom), vozík sa rozkladá pritlačením bokov sedačky smerom dole.

Je potrebné dávať pozor, aby boky sedačky boli v plastových úchytkách. Nesprávne rozloženie sedačky môže spôsobiť prasknutie úchytiak a poškodenie vozíka.

- Je potrebné pravidelne kontrolovať stav vozíka a zabezpečovať jeho údržbu:

- a) kontrolovať tlak v pneumatikách - tlak by mal byť v oboch kolesách rovnaký a jeho hodnota by nemala byť vyššia ako 3,8 baru.
- b) kontrolovať stav pneumatík - ak sú opotrebované, vymeňte ich.
- c) kontrolovať pritiahnutie skrutiek spojovacích častí.
- d) čistenie zašpineného vozíka vlhkou handričkou.
- e) čistenie čalúnenia vlhkou handričkou, prípadne s použitím čistiacich prostriedkov.
- f) dezinfekcia čalúnenie vozíka určenými dezinfekčnými prostriedkami s atestom.

Výrobca:

KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD

No. 2363 Sec.2 UNIVERSITY RD., MIN-HSIUNG SHIANG, CHIA-YI HSIEN, TAIWAN

Splnomocnenec pre EÚ:

Karma Mobility Limited

Unit 6, Target Park, Shawbank Road,

Reddich B98 8YN, UK

Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716

