

Palice – návod na použitie

Vychádzkové palice sú určené na zaistenie podpory pri chôdzi pre osoby s poruchou mobility. Palice majú ako základ jeden bod. Palicu sa odporúča držať v ruke na strane chorej nohy. V momente stavania sa na chorú nohu sa odporúča v rovnakom čase podopierať sa palicou.

Výnimku tvoria palice AT51108 pre nevidiace osoby. Palicu treba držať takým spôsobom, aby bol jej koniec umiestnený bezprostredne nad povrchom zeme. Presúvaním palice striedavo vľavo a vpravo užívateľ môže rozhodnúť, či existujú pred ním nejaké prekážky, o ktoré by mohol naraziť.

Upozornenie (nevzťahuje sa na AT51108): Palicu je potrebné udržiavať vo vzpriamenej polohe, aby bolo možné zabezpečiť stabilnú podporu. Nadmerné vychýlenie palice môže viesť ku skĺznutiu a aj prevráteniu užívateľa.

Model AT51108 – kontrola cesty pred nevidiacim užívateľom pomocou palice AT51108 je len jeden zo spôsobov kontroly cesty pre nevidiacu osobu a nevylučuje všetky ostatné potencionálne riziká, ktoré vznikajú premiestňovaním sa nevidiacej osoby.

Výrobca:
ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko



Výhradný dovozca:
ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329, 015 01 Rajec
Tel./fax: 041 542 49 16
www.anmedplus.sk

LOT