

Palica vychádzková skladacia

Návod na použitie:

Zloženie vychádzkovej palice sa vykoná vytiahnutím dielov palice od seba (sú spojené gumovým perom) a naskladaním dielov vedľa seba. Palicu uložte do puzdra.

Vychádzkovú palicu je možné výškovo nastaviť podľa potreby užívateľa: zatlačte poistný kolík, palicu nastavíte do potrebnej výšky tak, aby sa poistný kolík opäť vysunul a zaistil tak palicu proti nežiaducemu zloženiu.

POZOR: Po úprave výšky palice musí byť poistný kolík poriadne zasunutý.

Dbajte na včasnú výmenu gumenej koncovky palice, aby nedošlo k poškodeniu kovovej časti.

Maximálna nosnosť palice je 100 kg.

Hlavná funkcia: Zaistená podpora pri chôdzi

Postup pri čistení:

Utrite vlhkou handrou a riadne osušte. Nepoužívajte chemické prípravky k čisteniu. Nevystavujte dlhodobo intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo inému tepelnému zdroju ani pri sušení palice.

Výhradný dovozca:

ANMED PLUS s.r.o.

Nádražná 329, 01501 Rajec.

Tel/fax: 041 542 49 16.

www.anmedplus.sk



Výrobca:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

LOT
