



NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłaska 43
03-068 Warszawa
Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Stolička do sprchy**

Model: **AT51009**

AT51010

AT51011

AT51012

AT01004

AT01005

AT51016

Obsah balenia: 1 ks

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Osobitné podmienky zaobchádzania: Po použití alebo očistení stoličku riadne osušte.

Výstraha: - **Pred použitím sa uistite, že stolička je umiestnená stabilne. Pri užívaní stoličky musia byť všetky nohy v kontakte s podkladom. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame kombinovať s protišmykovou podložkou a madlom.**
- **Pri nastavovaní výšky stoličky postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.**
- **Pri transporte (automobilom alebo autobusom) nepoužívajte stoličku na sedenie!**
- **Stoličku nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť 100 kg!**

Dátum vydania návodu na použitie: 20. 08. 2014

Stolička do sprchy je súčasťou rady kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Svoje využitie nachádza najmä tam, kde pacient vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nie je schopný pri osobnej hygiene využiť štandardne vybavenú sprchu. Svojou konštrukciou uľahčuje pacientom bežné úkony osobnej hygieny a zároveň eliminuje možné riziko pri týchto úkonoch, výrazným spôsobom uľahčuje manipuláciu s pacientom a zvyšuje jeho sebestačnosť.

Rám stoličky je vyrobený z povrchovo upravených duralových trubiek vysokej pevnosti. Je doplnený plastovým hygienickým sedadlom, pevnými podrúčkami a opierkou chrbta (okrem AT51009 a AT01004). Oporné nohy umožňujú výškové nastavenie stoličky a sú v spodnej časti vybavené gumovými protišmykovými nastavcami.

Nosnosť: 100 kg

NASTAVENIE VÝŠKY STOLIČKY:

Pre nastavenie výšky stoličky vytiahnite aretačnú "E" poistku a ľahom/tlakom nastavte požadovanú dĺžku nohy. Poistku potom vo zvolenej polohe vráťte späť.

Tento postup opakujte pri všetkých štyroch nohách.

ÚDRŽBA:

Stoličku možno čistiť a udržiavať umývaním vodou, použitím bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a nespôsobujú mechanické narušenie povrchu.

Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nastavcov a polohu aretačných poistiek, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nastavce.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním.

Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, opravě, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

VÝHRADNÝ DOVOZCA:

ANMED PLUS, s.r.o.

Nádražná 329, 015 01 Rajec

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk

www.anmedplus.sk

Tel. / Fax: 0 415 424 916



Záznamy požadované predpismi MDR.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

INFORMÁCIE



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

INFORMÁCIE

Výrobky AT53501, AT53502, AT53503, AT53504, AT53505, AT53506, AT53507, AT53508, AT53509, AT53510, AT53511, AT53512, AT53513, AT53514 a ďalšie výrobky začínajúce AT535XX (kde X predstavuje ľubovoľné číslo) - vložky a podpätenky pod značkou ANTAR obsahujú tkanivá živočíšneho pôvodu (živočíšna koža).

Verzia návodu na použitie: 2021-05-25.1

Dátum vydania aktuálnej verzie návodu na použitie: 2021-05-25

