

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.

2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.

4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.

5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.

6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.

7) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.

8) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawisłańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16



NÁVOD NA POUŽITIE

Ortéza kolena teleskopická

Model: **AT53001, AT53002**




Univerzálna teleskopická ortéza kolena s nastaviteľným rozsahom pohybu

Tento produkt je multifunkčné zariadenie pri rehabilitácii kolena. Dokonale stabilizuje kolenný kĺb a celú končatinu. Ortéza zabezpečuje činnosť kĺbu v prísne kontrolovanom, optimálnom, anatomickom rozsahu pohybu, korigujúc jeho deformácie a predchádzajúc jeho patologickým odchýlkam. Bočné vystuženie s ťahmi zaisťuje úplnú priečnu stabilizáciu kolena a nastaviteľný kĺb zaisťuje pozdĺžnu kontrolu, umožňuje regulovať uhol sklonu a narovnanie kolena. Ortéza je vhodná pri poškodení väzov kolenného kĺbu, nestabilite kolenného kĺbu, a slúži k pooperačnej stabilizácii a zníženiu rozsahu pohybu kolenného kĺbu. Unikátny dizajn umožňuje individuálne nastavenie veľkosti.


NASTAVENIE:

Prvýkrát môže ortézu aplikovať výlučne zdravotnícky personál.


1. Odopnite 4 plastové spony a položte otvorenú ortézu na plochu. Popruhy by mali byť umiestnené v pozíciách A a B. Pre zaistenie pohodlia odopnite popruhy a nastavte ich tak, aby sa koniec spony nachádzal nad výstelkou.

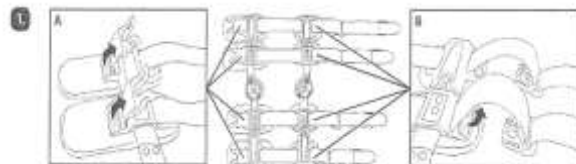

2. Umiestnite ortézu tak, aby sa koleno nachádzalo medzi pántami. Stlačte tlačidlo C a D, aby ste predĺžili teleskopické lišty do požadovanej pozície v závislosti od dĺžky nôh, potom tlačidlo uvoľníte, vráti sa do uzamknutej polohy silou pružiny. Obe lišty by mali byť v rovnakej výške nad aj pod kolenom. Uistite sa, že hodnoty stupnice sú na oboch stranách rovnaké, nerovnomerné nastavenie môže spôsobiť poškodenie.
Poznámka: Plastová lišta označená „TOP“ musí byť na stehne a druhá strana na lýtku.

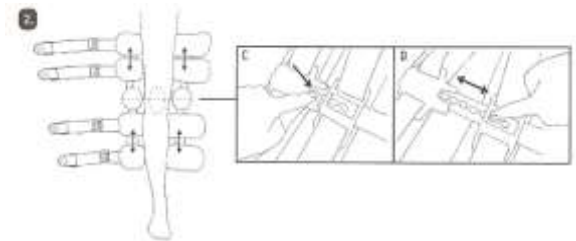


3. Umiestnite ortézu do polohy zodpovedajúcej výške a stredu nohy a vycentrujte kĺbový mechanizmus voči kolenu, ako je znázornené na obrázku.
4. Zapnite dva popruhy/ dve spony, ktoré sú najbližšie ku kolenu.
5. Utiahnite uvoľnený pás okolo ortézy.

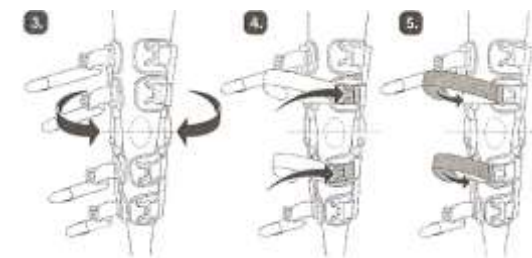


6. Zapnite ďalšie dve spony a upevnite popruhy rovnakým spôsobom ako v kroku 5.
7. Utiahnite všetky popruhy, zachovajúc pozíciu závesných lišt vzhľadom k dĺžke nohy a pozícii kolena.
8. Ak je potrebné odstrániť nadbytočný popruh, odopnite suchý zips, skráťte popruh a opäť pripnite suchý zips. Upravte popruhy pre pohodlie pacienta.


Po nastavení dĺžky pásov by mal pacient používať **VÝLUČNE** spony na zloženie/nasadenie ortézy.

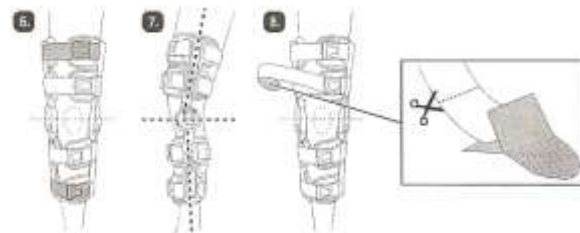

9. Pomocou stlačeného tlačidla a zvolením zodpovedajúceho nastavenia je možné vybrať rozsah roztiahnutia ortézy od 0° do 90°.
10. Rozsah ohýbu možno nastaviť v rozmedzí 0° až 120°.

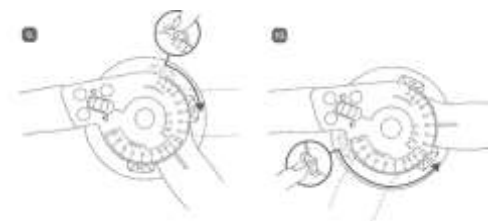

11. Rýchla blokáda: Obe strany nosného ramena možno zablokovat posunutím blokovacieho tlačidla v jednej zo štyroch polôh ohýbu 0°, 15°, 30° a 45°.
Poznámka: Dbajte na to, aby nastavenie na oboch stranách bolo rovnaké.

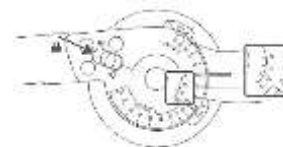

12. Ak chcete zabrániť zmene nastavenia ohýbania alebo roztahovania, môžete použiť plastové sťahovacie pásky. Vsuňte jeden plastový pásik pod tlačidlo, ako je znázornené na obrázku.



13. Oviňte tlačidlo a vsuňte sponu pod tlačidlo z opačnej strany, tak aby nevypadla.
14. Utiahnite a skráťte vyčnievajúci koniec.

UPOZORNENIA A ÚDRŽBA:

- Táto pomôcka je určená iba pre jedného pacienta. Nie je určená na opakované použitie iným pacientom.
- Ak sa v priebehu používania ortézy objaví bolesť, opuch alebo iné príznaky, prestaňte ju používať a obráťte sa na lekára.
- Toto zariadenie je určené na ochranu poškodeného miesta v obmedzenom rozsahu pohybu v súlade s rehabilitačným programom alebo inými rehabilitačnými prostriedkami predpísanými lekárom.
- Penové výstelky možno sňať a oparť jemným mydlom. Po vysušení sa môžu výstelky opäť založiť a používať.
- Skladovanie: v suchom čistom prostredí, dobre vetranom, bez korozívnych plynov, pri izbovej teplote.