



NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawisłańska 43

03-068 Warszawa

Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Ortéza členka a predkolenia rigidná pneumatická**

Model: **AT53003; AT53004; AT53005; AT53006**

Obsah balenia: 1 ks

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Osobitné podmienky zaobchádzania: Výrobok perte ručne vo vlažnej vode. Nepoužívajte bielidlá. Výrobok nežehlite.

Upozornenie: **Nepoužívajte ortézu, ak ste použili masť alebo zahrievací gél.**

Dátum vydania návodu na použitie: 12.10.2015

Ortéza zabezpečuje celkovú imobilizáciu členkového kĺbu a predkolenia. Model AT53003, AT53004 umožňuje reguláciu ohybu a narovnania kĺbu. Ortézy pomáhajú udržať prirodzenú telesnú teplotu, zlepšujú krvný obeh a tým zmierňujú bolesť, opuchy a stuhnutie. Ortézy sú určené k liečbe zlomenín v okolí členkovo-holenného kĺbu, zlomenín chodidla, poškodení mäkkých tkanív, zápalu Achillovej šľachy, vyvrtnutí.

Po rozviazaní pásov vložte nohu do ortézy a potom pásy upevnite. Ortéza sa zakladá tak, aby päta bola vzadu a prsty boli v príslušnom otvore. Pneumatické vložky sa dokonale prispôbia tvaru nohy a predkolenia. Regulácia ohybu umožňuje optimálne nastavenie pohybu nohy.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním.

Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

Výhradný dovozca:

ANMED PLUS s.r.o.

Nádražná 329, 01501 Rajec

Tel/fax: 041 542 49 16

www.anmedplus.sk