

ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na chodítko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo chodítko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu
- 5) **Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.**

NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO KOLESOVÉ

AT 02008

AT 02009



POUŽITIE:

Chodítko je súčasťou radu kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Chodítko je určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následné rehabilitáciu. Je vhodné tiež pre transport drobných predmetov.

POPIS:

Skladací rám chodítka je vyrobený z povrchovo upravených hliníkových rúrok vysokej pevnosti. Rám je doplnený štyrmi kolieskami (tromi pri type AT 02008), z ktorých predné dve majú uloženie v otočnej vidlici a ergonometrickými výškovo nastaviteľnými rukoväťami. Kolieska umožňujú posúvanie chodítka a to tak, že silne uchopíte rukoväť chodítka a ľahko tlačíte dopredu. Chodítka sú vybavené ručnou brzdou s možnosťou aretácie. Chodítko je vybavené sedadlom a nákupným košíkom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Pred používaním chodítka konzultujte jeho vhodnosť s ošetrojúcim lekárom. Pred používaním chodítka si pozorne prečítajte návod na použitie a v prípade nejasností kontaktujte vášho dodávateľa. Užívateľ chodítka musí dbať na zvýšenú opatrnosť. Užívateľ sa nesmie nedmerne nakláňať, hlavne dozadu, inak môže dôjsť k prevráteniu. Chodítko nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť. Pri skladaní a rozkladaní postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov. Ak je chodítko v pokoji, vždy zaaretujte brzdy. Pri užívaní chodítka musia byť všetky kolesá v kontakte s podkladom.

ZLOŽENIE A NASTAVENIE CHODÍTKA:

Rám chodítka vyberte z krabice a stlačením prednej a zadnej časti od seba rám rozložte. Madlá vložte do otvorov v hornej časti rámu a nastavte požadovnú výšku madiel, upevnite pomocou skrutiek. Brzdové lanky by mali viesť zvonka rámu aj madiel. Zasuňte opierku chrbta stlačením poistiek. Nasadte vidlice s kolieskami do otvorov na spodnej časti rámu a upevnite skrutky. Nakoniec nasadte nákupný košík, ktorý sa voľne zavesí na rám chodítka pod sedadlom.

Po odklopení bočnej poistky, prípadne uvoľnením ďalšieho istiaceho prvku a následnom zatlačení na blokovaciu kľbovú vzperu, možno rám chodítka jednoduchým spôsobom zložiť do transportnej polohy.

BRZDY:

Pred každým použitím vyskúšajte správnu funkciu brzd. Pri stlačení páky brzdy smerom nahor by chodítko malo pribrzdiť až úplne zastaviť. Stáčaním páky smerom dole by sa brzdy mali zaaretovať. Opačným spôsobom brzdy odblokujte. Vždy používajte obe brzdy súčasne.

ÚDRŽBA:

Chodítko je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nástavcov a polohu aretačných poistiek, ev. odstraňovať mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nástavce.

SERVIS A OPRAVA:

V prípade potreby odstránenia závady alebo vykonania servisu, kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne všetky informácie.

ZÁRUKA:

Záruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobené obvyklým užívaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavovaní alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom ako výrobcom alebo dovozcom (pozri nižšie) alebo predávajúcim.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716

