



## NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa  
Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Stolík k lôžku**

Model: **AT51020, AT51021**

Obsah balenia: 1 ks

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Dátum vydania návodu na použitie: 25.6.2018

Stolíky sa používajú ako doplnok pre pacientov pripútaných na lôžko. Svoje využitie nachádzajú najmä tam, kde pacient vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nie je schopný vstať z lôžka a použiť štandardný jedáľenský stôl. Stolíky umožňujú ležiacim pacientom pohodlné jedenie a polozenie rôznych predmetov, zvyšujú jeho sebestačnosť.

Stolík by mal byť nastavený tak, aby vrch stolíka bol nad pacientom, nebrániac mu v pohybe. Rám stolíka k lôžku je vyrobený z povrchovo upravených oceľových trubiek vysokej pevnosti a pracovná doska je výškovo nastaviteľná. Výšku stolíka možno pre pacienta nastaviť do optimálnej výšky, pri niektorých modeloch je možné nakloniť pracovnú dosku. Pri štvorkolesových modeloch je možné stolík zablokovat' vo vhodnej polohe pomocou brzdy na kolieskach.

ÚDRŽBA: Stolík k lôžku možno čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá.

Po vyradení z používania dodržujte postup stanovený pre komunálne odpady.

VAROVANIE: Uistite sa, že po vykonaní regulácie výšky, je regulačné koliesko dobre utiahnuté, inak pracovná doska môže spadnúť na užívateľa a spôsobiť úraz. Uistite sa tiež, že stolík má zablokované brzdy na kolieskach (u štvorkolesových modeloch), najmä keď pacient je jedlo, inak sa stolík môže nečakane premiestniť.

Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame teda pravidelne kontrolovať stav všetkých istiacich prvkov, koliesok atď.

### ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

### Výhradný distribútor:

**ANMED PLUS s.r.o.**

Nádražná 329, 015 01 Rajec

Tel./fax: 041 542 49 16

[www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)

